



Nanoframe (NF) - návod na použití


Před manipulací s filtrem si umyjte ruce. Filtr nastříhejte na požadovanou velikost 19 nebo 21 cm. Pod filtr podložte např. list papírové kuchyňské utěrky, pozor ať filtr neprotrhnete!

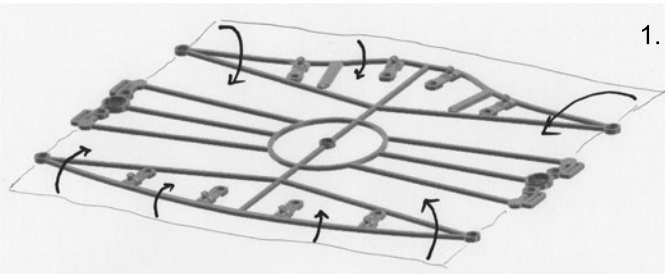


1. Položte filtr vnější stranou nahoru a přiložte NF tak, aby byly magnety nahoře. Přeložte přečínající části filtru přes NF.

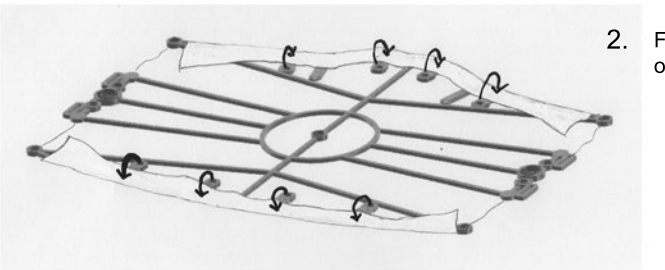


2. Filtr přeložený přes okraje zafixujte osmi klipy, 4 nahoře a 4 dole.

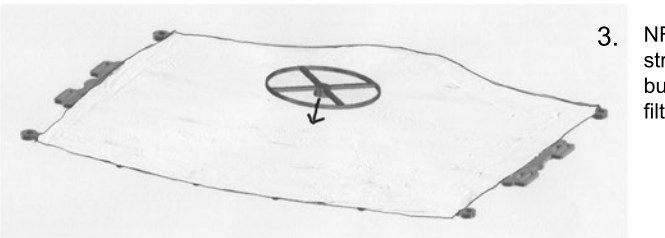

3. NF s filtrem obraťte z druhé vnitřní strany a zlehka vložte vnitřní kolečko, bude zabráňovat vdechování a plandání filtru.

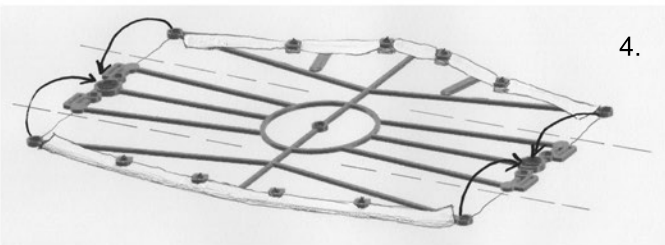

4. Nyní můžete NF složit do finálního tvaru vždy horní a dolní magnet na silný centrální magnet. Magnety by měly sedět na sobě.

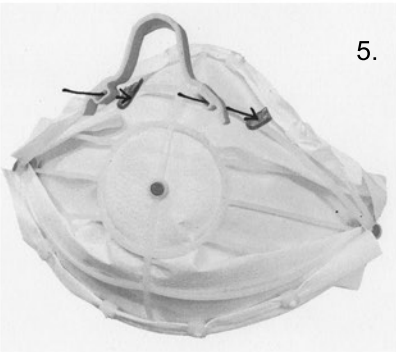

5. Zbývá nasadit nosní část, která pomáhá tvarovat toto místo. Nosní část se nasune na dvě pacičky vyčnívající z NF. Je to důležité pro dokonalé přilnutí ke tváři.

6.

Do připravených otvorů po stranách už zbývá přidělat jen gumičky podle Vaší preference.

7.

Po použití, NF rozepněte a kontaminovaný filtr vyhodte do koše. Celý NF bez filtru dezinfikujte např. isopropylalkoholem a můžete nasadit nový filtr viz bod 1.